


Film z instrukcją pobierania stolca

Film instruktażowy można obejrzeć po zeskanowaniu poniższego kodu za pomocą czytnika QR na smartfonie.

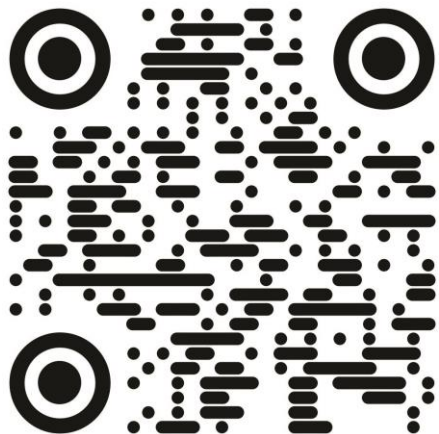

Film można obejrzeć także po kliknięciu na link:

https://youtu.be/-s0Obyr0M_I



TYPE

TYP

Zaznacz niżej typ konsystencji stolca.

Oddaj tę kartę razem z próbką do ośrodka w ciągu 48 godzin od pobrania próbki stolca.

Bristolska skala uformowania stolca

TYPE 1		Oddzielne twarde grudki, jak orzechy (trudne do wydalenia)	☐
TYPE 2		W kształcie kiełbaski, ale grudkowaty	☐
TYPE 3		W kształcie kiełbaski, ale z pęknięciami na powierzchni	☐
TYPE 4		W kształcie kiełbaski lub węża, gładki i miękki	☐
TYPE 5		Miękkie grudki z wyraźnymi krawędziami (łatwe do wydalenia)	☐
TYPE 6		Postrzępione kawałki z nieregularnymi krawędziami, stolec papkowaty	☐
TYPE 7		Wodnisty, bez stałych elementów, całkowicie płynny	☐